



Incidin® Liquid

DIE ALKOHOLISCHE SCHNELLDESINFEKTION

- ▲ Aldehydfrei und Noroviruswirksam
- ▲ Gebrauchsfertig mit angenehmen Geruch
- ▲ VAH-gelistet



Incidin® Liquid

GEBRAUCHSFERTIGES SPRAY ZUR ALKOHOLISCHEN SCHNELLEDESINFEKTION

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Breites Wirkspektrum gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen	Hohe Desinfektionssicherheit auf allen alkoholbeständigen Flächen, selbst in Risikobereichen
Gebrauchsfertige Spraylösung mit besonders kurzer Einwirkzeit und angenehmen Geruch	Schnelldesinfektion und Reinigung in Kombination mit sicherer und gezielter Anwendung, dabei angenehm im Gebrauch
Ausgewogene, synergetische Formulierung verschiedener Wirkstoffe, aldehydfrei	Gute Benetzung, schnelle und rückstandsfreie Abtrocknung durch Alkohole, dabei mit sehr guter Anwenderverträglichkeit



Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte

CE 0297



Alkoholische Schnelldesinfektion für alkoholbeständige Flächen aller Art.
D BIOZID N-12496

WIRKSAMKEIT

KONZENTRATION

EINWIRKZEIT

VAH-Liste (bakterizid, levurozid, mycobakterizid)		Min.
Flächendesinfektion gemäß VAH (inkl. TB) mit und ohne Mechanik, mit geringer und hoher Belastung	konzentriert	5
IHO-Viruzidie-Liste		Min.
Prüfung gemäß DVV mit / ohne Belastung		
Begrenzt viruzid * (inkl. HIV, HBV, HCV)	konzentriert	1
Rotavirus	konzentriert	1
Adenovirus	konzentriert	5
Papova-Viren / Polyomavirus SV40	konzentriert	10
EURO-Normen		Min.
EN 13727 (geringe und hohe Belastung)	konzentriert	1
EN 13624 (levurozid / mit / ohne Belastung)	konzentriert	1
EN 14348 (tuberkulozid mit / ohne Belastung)	konzentriert	1
Zusätzliche Wirksamkeiten		Min.
Kurzzeitdesinfektion nach DGHM Methode 2001	konzentriert	1
Norovirus (getestet am murinen Norovirus)	konzentriert	10
Influenza Viren ** (H1N1, A / H5N1)	konzentriert	

* gem. RKI-Empfehlung 1/2004 ** aufgrund begrenzter Viruzidie

ANWENDUNGSHINWEISE

Gebrauchsfertige Lösung zum Wischen oder Sprühen.

Produkt auf trockenen Zellstoff geben, die Oberfläche abwischen und antrocknen lassen oder Oberfläche aus ca. 30 cm Entfernung einsprühen (ca. 40 ml/m²) und antrocknen lassen. Soweit elektrische Geräte betrieben werden, ist auf Explosionsschutz oder spannungsfreien Zustand der Geräte zu achten. Laut UVV sind Schutzhandschuhe zu tragen.

Desinfektionsmittel sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g sind als Wirkstoffe enthalten: 35 g 2-Propanol, 25 g 1-Propanol

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Incidin® Liquid	30 113 40
Flasche	12 x 1 L
Incidin® Liquid	30 113 50
Kunststoffkanister	2 x 5 L
Incidin® Liquid	30 113 60
Kunststoffkanister	30 L

Produkte

Anwendung

Service

=

Sicherheit

UNSERE HYGIENELEISTUNGEN SCHÜTZEN LEBEN ...

Worldwide Headquarters
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com

Regional Office
Ecolab Deutschland GmbH
Reisholzer Werftstr. 38-42
40589 Düsseldorf
Phone +49 (0) 211 98 93-0
Fax +49 (0) 211 98 93-174
www.ecolabhealthcare.de

Regional Office
Ecolab Schweiz GmbH
Kriegackerstr. 91
CH-4132 Muttenz
Phone +41 (0) 614 66 94-66
Fax +41 (0) 614 66 94-55
www.ecolab-suisse.ch

